


# + MedControl

Система автоматизации медицинских осмотров

## Знакомимся с системой

Краткое руководство по прохождению осмотров

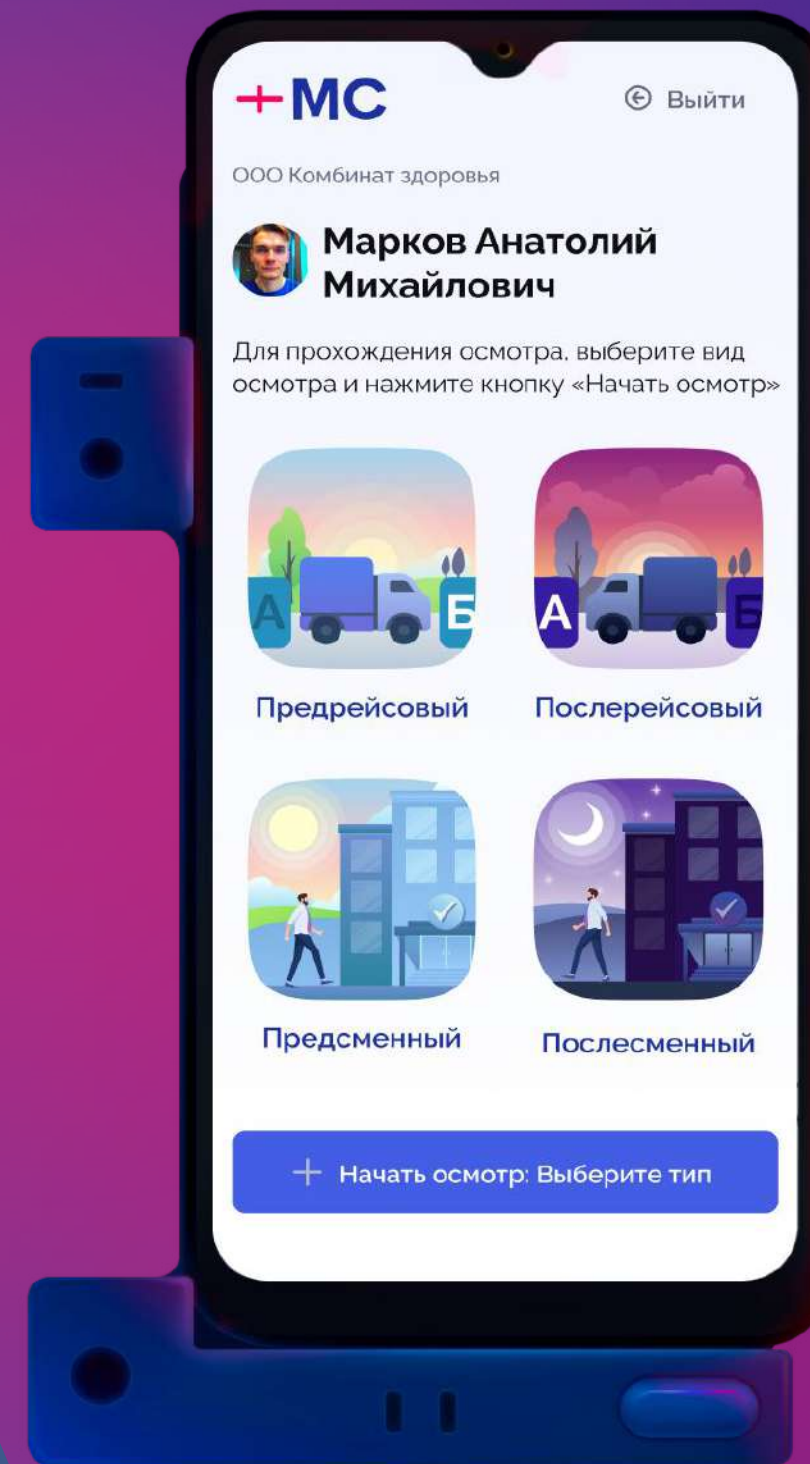


# Это СМК

Система медицинского  
контроля

Измерение температуры

Алкотестер с индивидуальным  
мундштуком

Индикаторы Bluetooth  
и состояния СМК

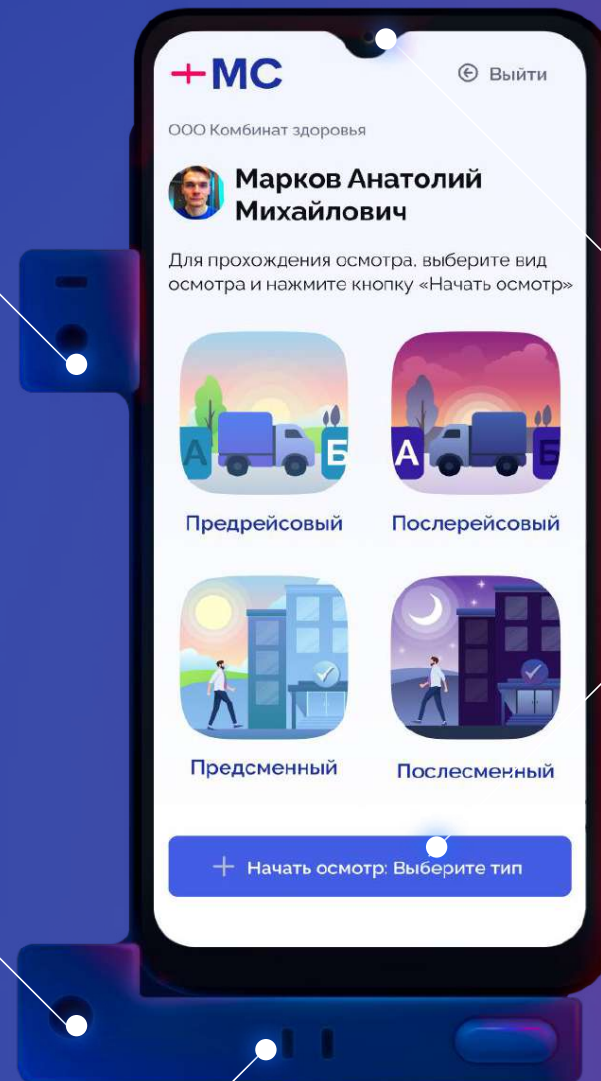

Камера фронтальная.  
Производит съемку вашего осмотра

Система MedControl

Манжета для измерения  
давления и пульса



# Как проходит работа с СМК

Процесс займет  
**2 минуты**

1

## Вы авторизуетесь

Способ входа вы получите от вашей организации



2

## Проходите осмотр

Выполнить 3 измерения: температура, давление, алкотестирование



3

## Получаете стикер

Стикер с допуском к рабочим обязанностям можно вклеить в путевой лист

Рассмотрим действия по порядку

# Авторизация


1



## Приветствие

Для начала работы коснитесь экрана


2

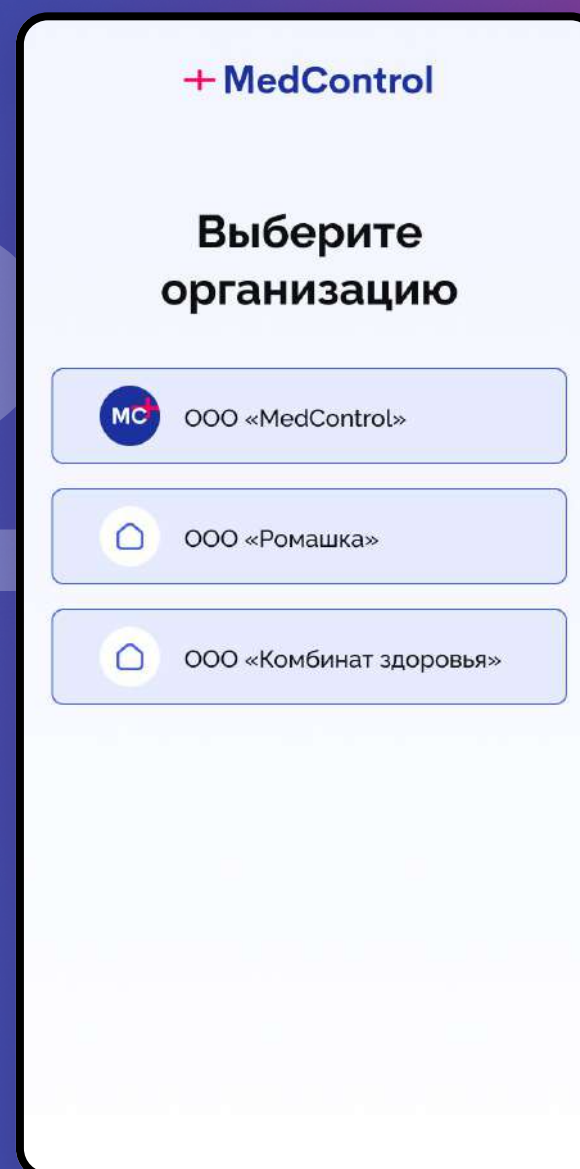

## Выбор организации

Если на вашем ПАК проходят осмотр сотрудники разных организаций, то вы можете увидеть данный экран. Выберите вашу организацию и продолжайте работу.

3

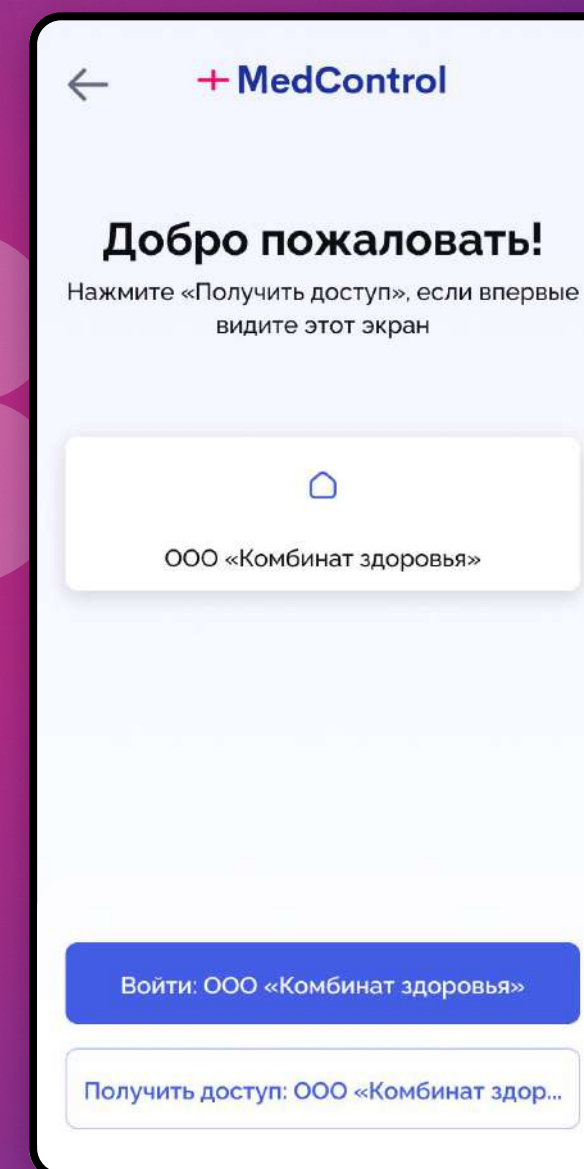

## Вход в систему

Если вы уже проходили осмотры в системе и вам был выдан код доступа, то нажмите кнопку «Войти...», если это первый опыт знакомства с ситемой, то выбирайте «Получить доступ...»

# Получение доступа

← + MedControl

## Получить доступ

Для получения доступа введите телефон

Телефон E-mail СНИЛС Табельный ВУ

+ 7 (000) 000-00-00

Отправить код

У меня есть пароль

## Выберите способ получения кода доступа

или обратитесь к ответственному лицу

← + MedControl

## Введите код доступа

Вам был ранее выдан код доступа в личный кабинет

-----

Продолжить

Если вы не получили код, обратитесь к менеджеру вашей организации

## Введите код доступа

← + MedControl

## Придумайте пароль

Придумайте пароль, который будет использоваться при входе

Придумайте пароль

Повторите пароль

Пароль должен содержать:


- 8-32 символа
- латинские или русские буквы
- цифры

Сохранить и перейти в личный кабинет

## Придумайте пароль


который вы будете далее использовать для прохождения осмотра. Пароль должен быть легко запоминаемым для Вас и содержать символы, предложенные на экране

# Главный экран

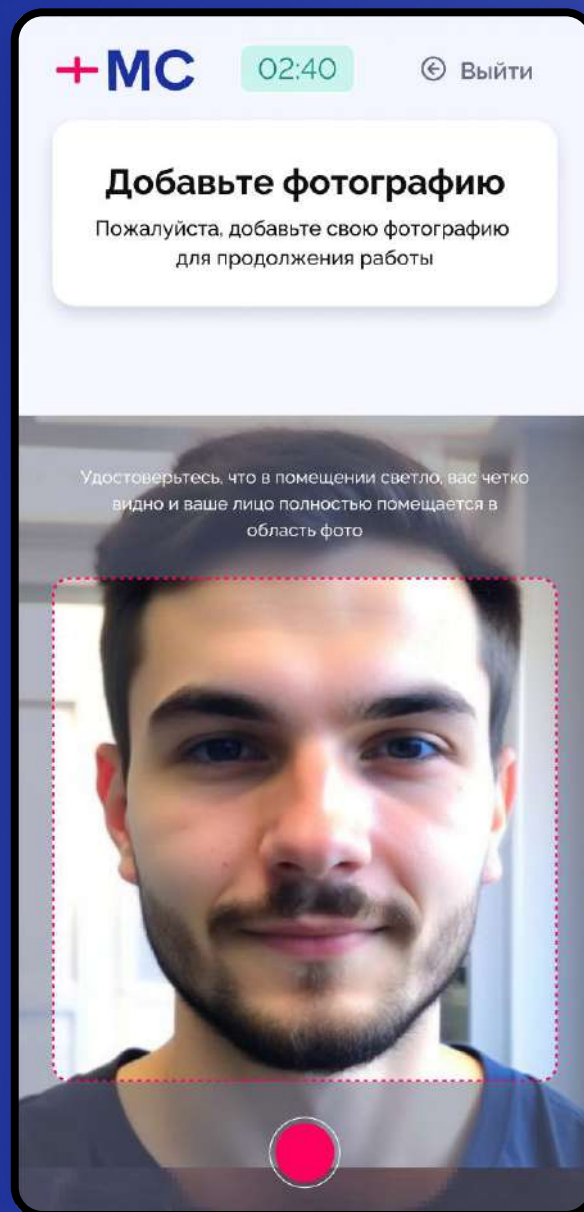

## ПАК


После авторизации, система может попросить вас сделать фотографию и подписать политику обработки персональных данных.

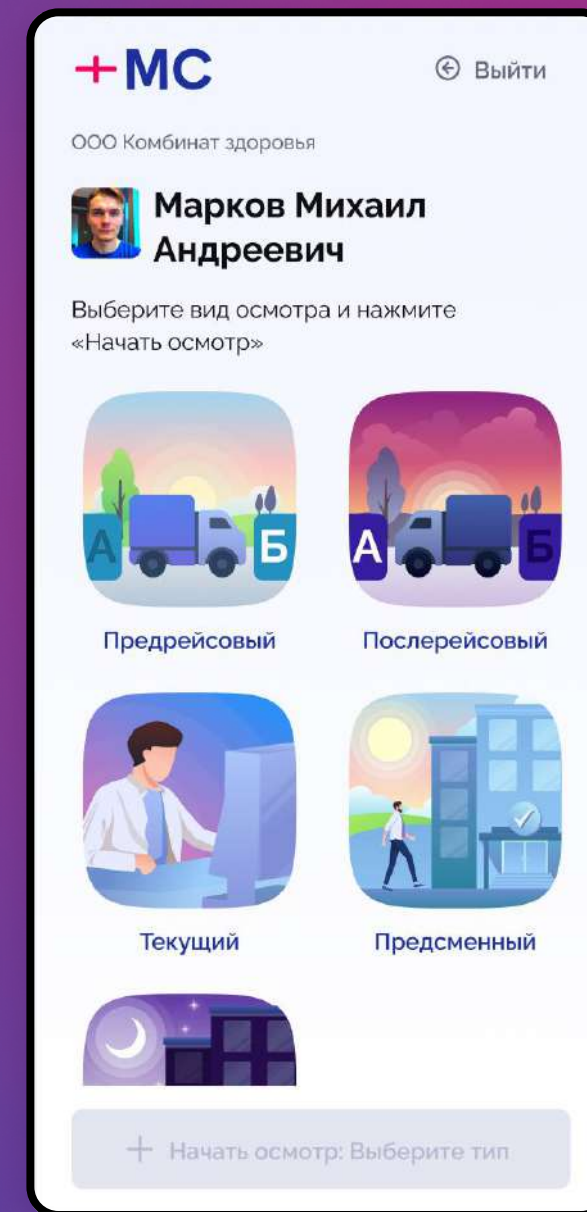

## Главный экран вашего кабинета

На данном экране выберите тип осмотра, и нажмите на кнопку «Начать осмотр»


# Этапы осмотра

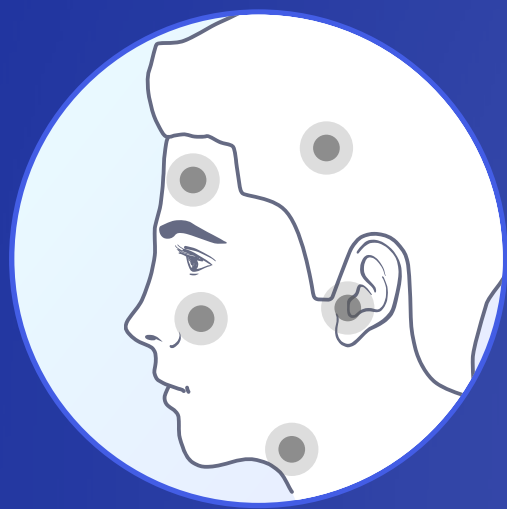

Сбор жалоб  
на самочувствие



Измерение  
давления

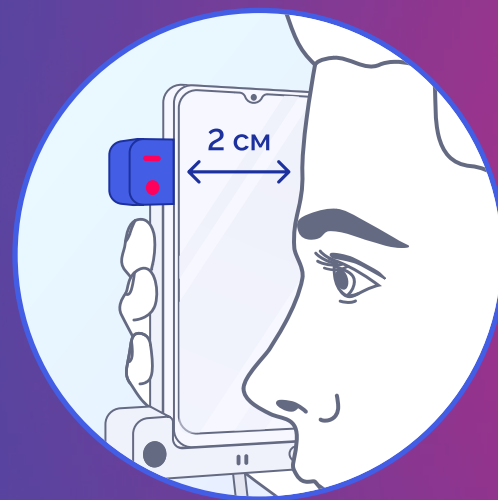

Измерение  
температуры



Измерение паров  
алкоголя



02:00


## Тайминг осмотра

01:40

Осмотр ограничен по времени, но его достаточно для спокойного прохождения. Цветовая индикация отображает оставшееся время. После истечения времени, вас разлогинит и отправит на стартовый экран

00:20


# Правила осмотра

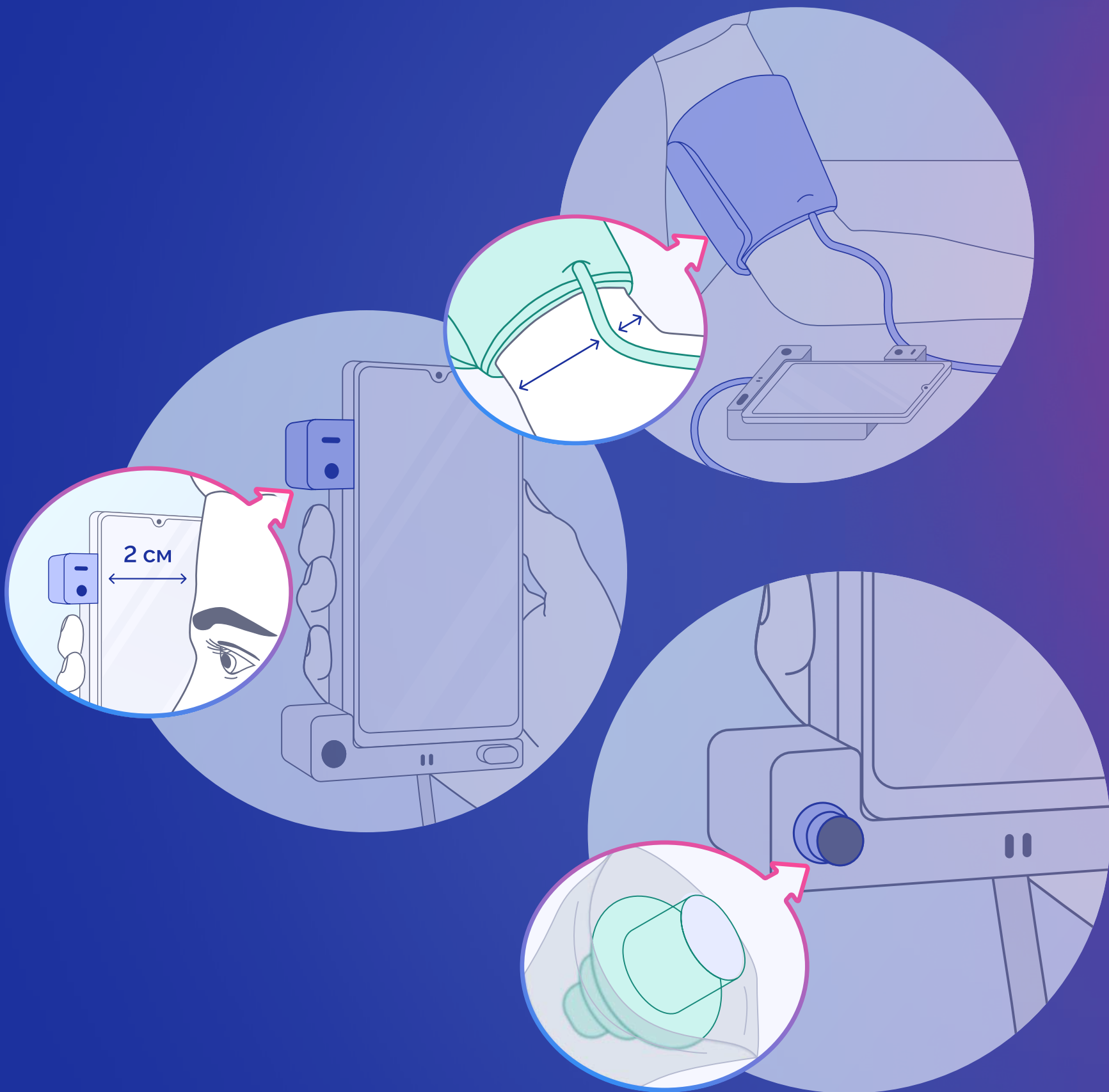

- 1 Перед началом осмотра снимите верхнюю одежду и головной убор
- 2 Внимательно читайте и следуйте инструкциям, появляющимся на экране
- 3 Ждите звуковые сигналы о начале и окончании измерений (температуры и паров алкоголя)
- 4 Дождитесь печати медицинского заключения и не забудьте его забрать с собой в рейс




# Измеряем давление

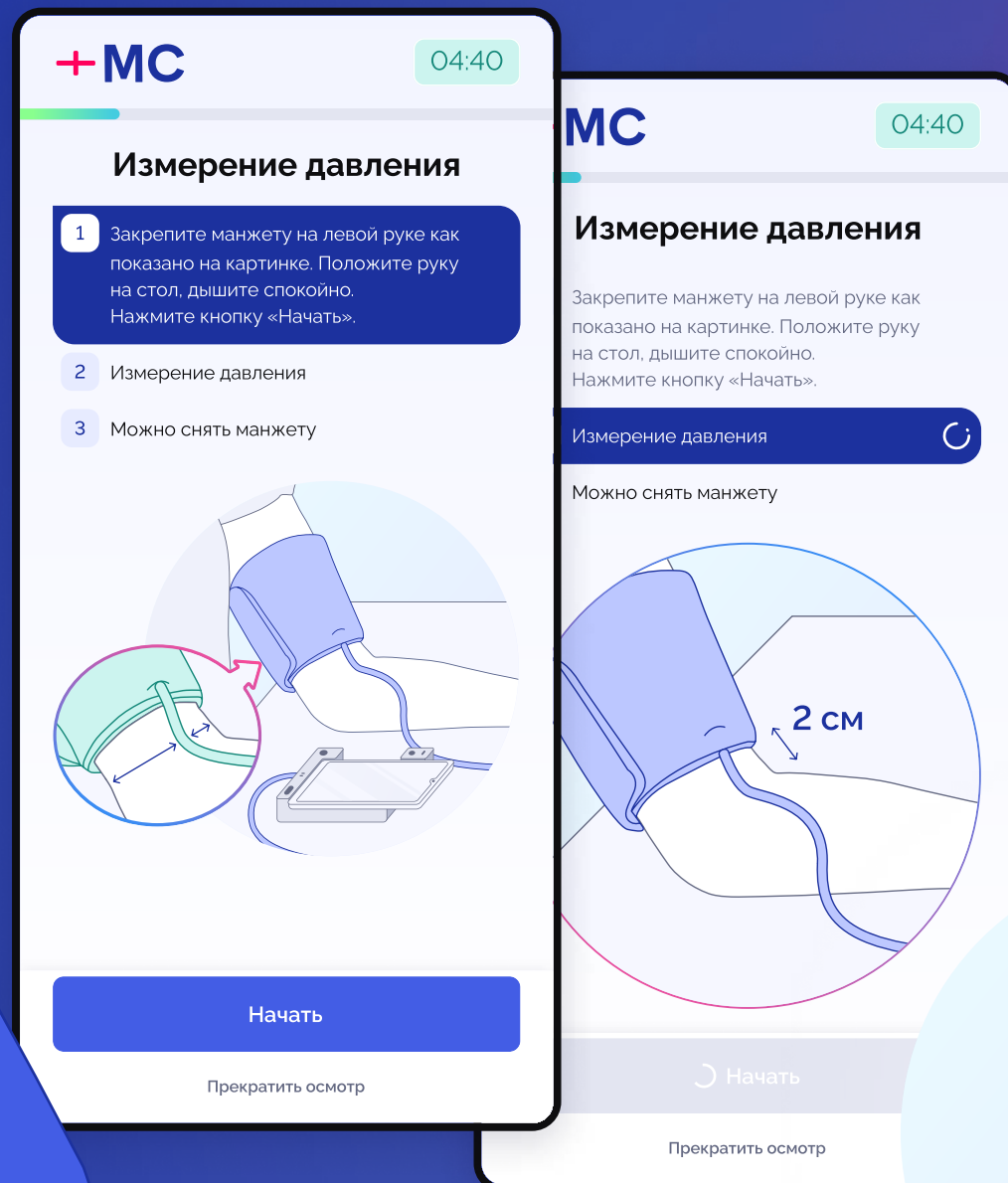

## Измерение давления

- 1 Закрепите манжету на левой руке как показано на картинке. Положите руку на стол, дышите спокойно. Нажмите кнопку «Начать».
- 2 Измерение давления
- 3 Можно снять манжету

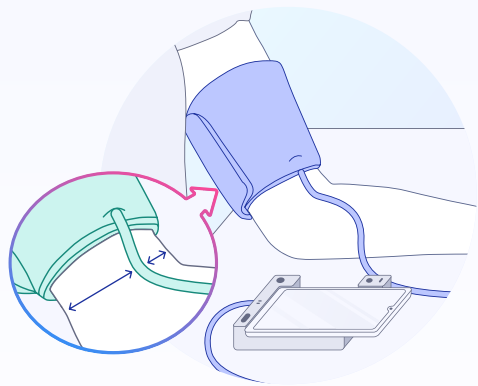

Начать


Прекратить осмотр

## Измерение давления

Закрепите манжету на левой руке как показано на картинке. Положите руку на стол, дышите спокойно. Нажмите кнопку «Начать».

Измерение давления

Можно снять манжету

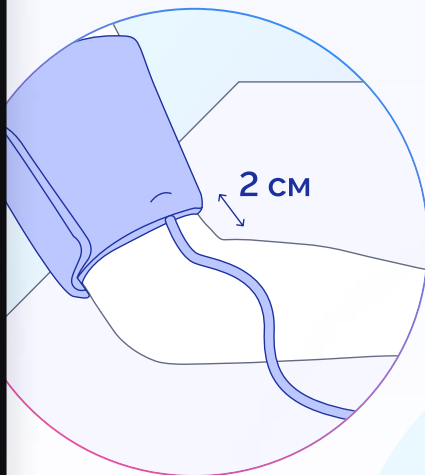

Начать

Прекратить осмотр

Измерение завершено,  
можно снять манжету


120  
65  
70

- Наденьте манжету выше сгиба локтя на два сантиметра, трубку направьте по центру внутренней части локтя
- Нажмите на кнопку «Начать измерение» и манжета начнет надуваться
- По готовности измерения вы услышите звуковой сигнал
- В случае ошибки или неверного измерения вы можете повторить измерение

2 см

2 см

# Измеряем температуру

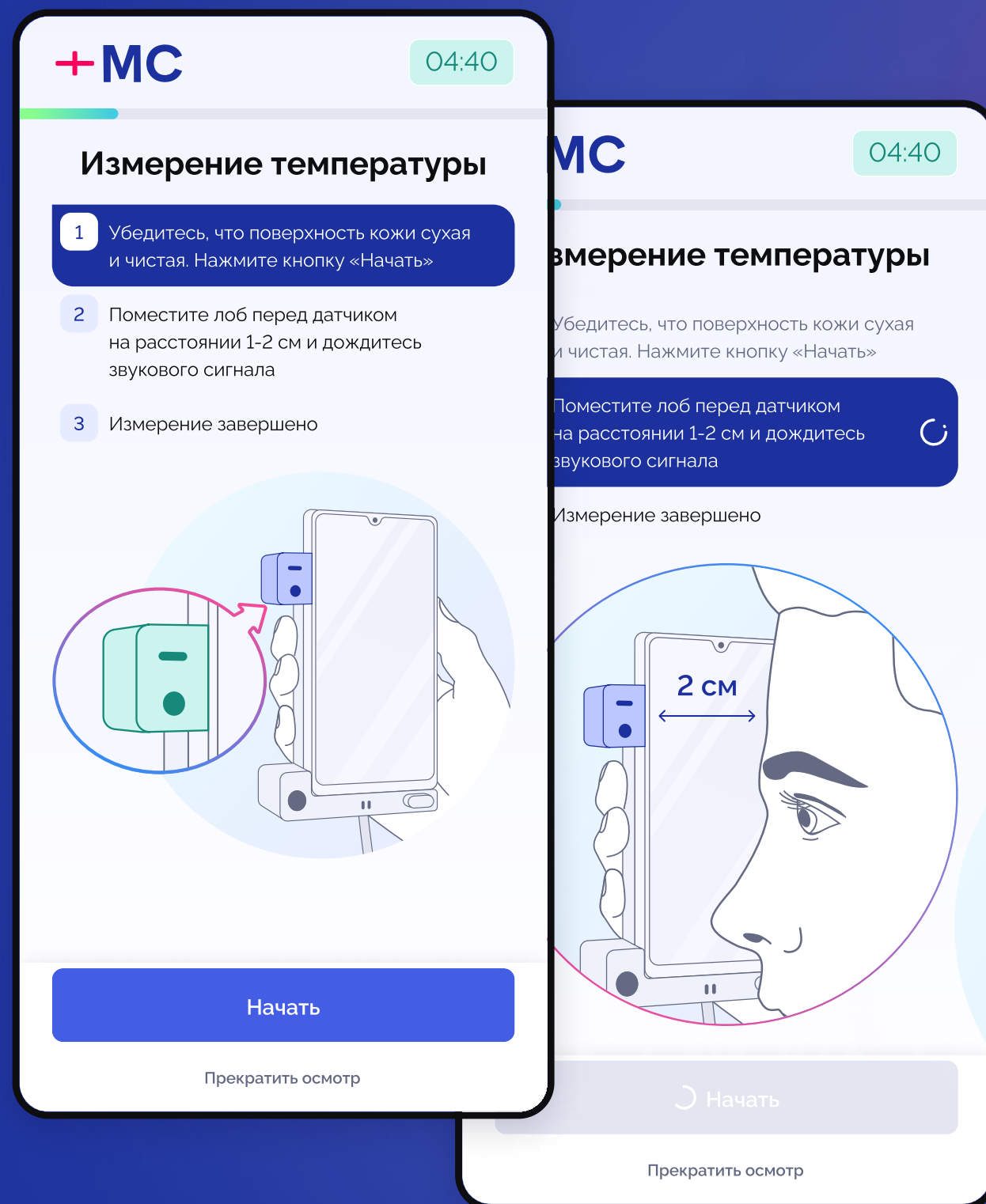


Для измерения температуры лоб должен быть сухой и чистый!

- Нажмите кнопку «НАЧАТЬ»
- После звукового сигнала разместите лоб на расстоянии 1-2 см. перед датчиком и дождитесь второго звукового сигнала
- В случае неудачной попытки измерение можно повторить


Измерение завершено,  
можно проходить дальше

36,6

# Измеряем пары алкоголя

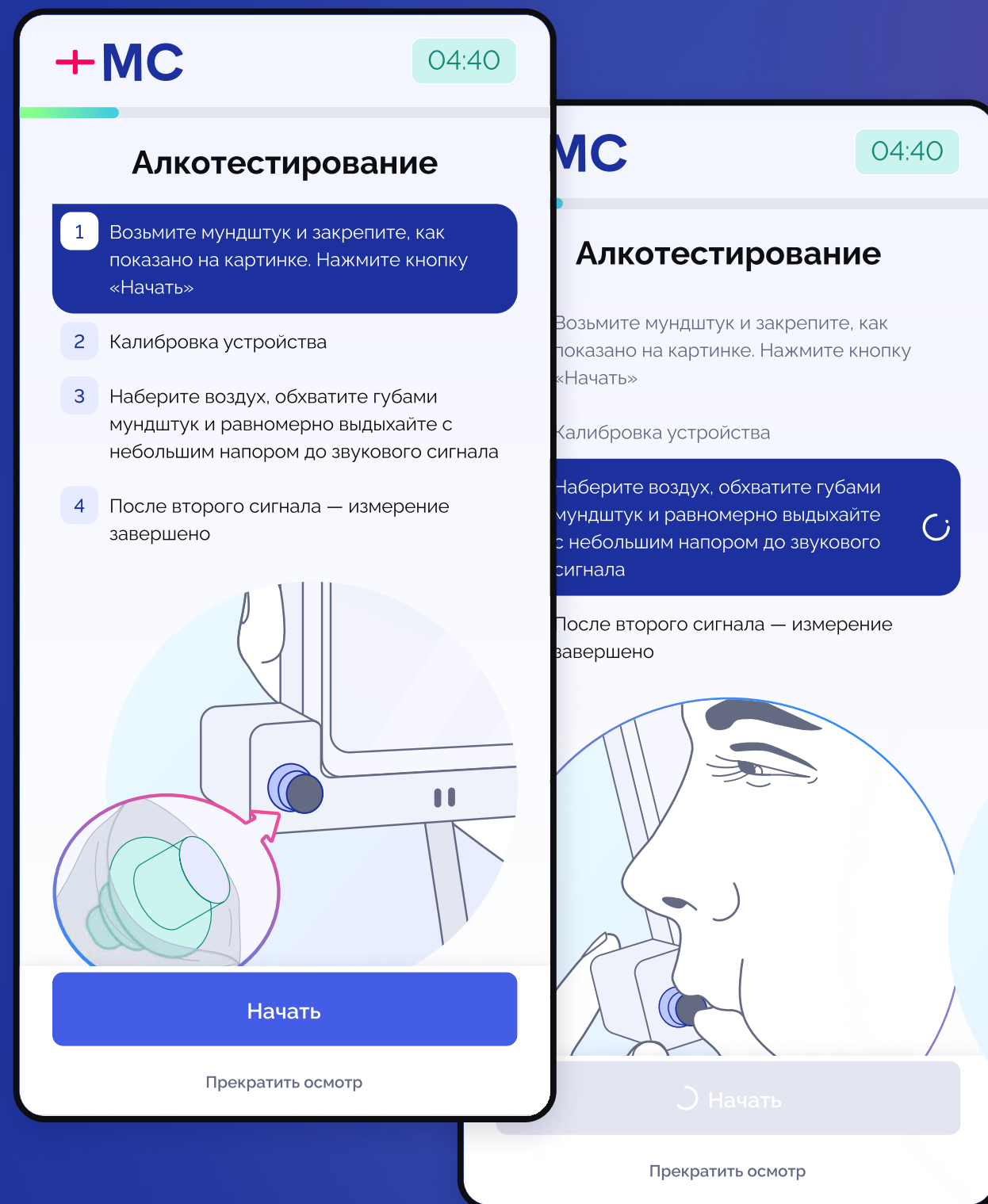


- Возьмите мундштук и установите его, как показано на картинке
- Нажмите кнопку «НАЧАТЬ» и обязательно дождитесь звукового сигнала
- Глубоко вдохните, обхватите губами мундштук и медленно, но с напором выдыхайте, пока не услышите следующий звуковой сигнал

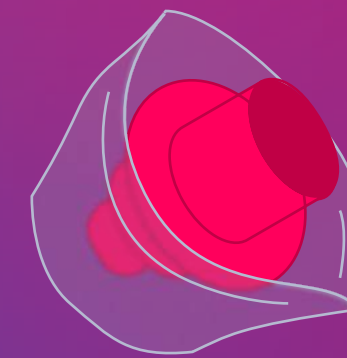

Индивидуальный мундштук находится возле ПАК, возьмите его заранее и вставьте в отверстие, как показано на изображении

# Получаем стикер

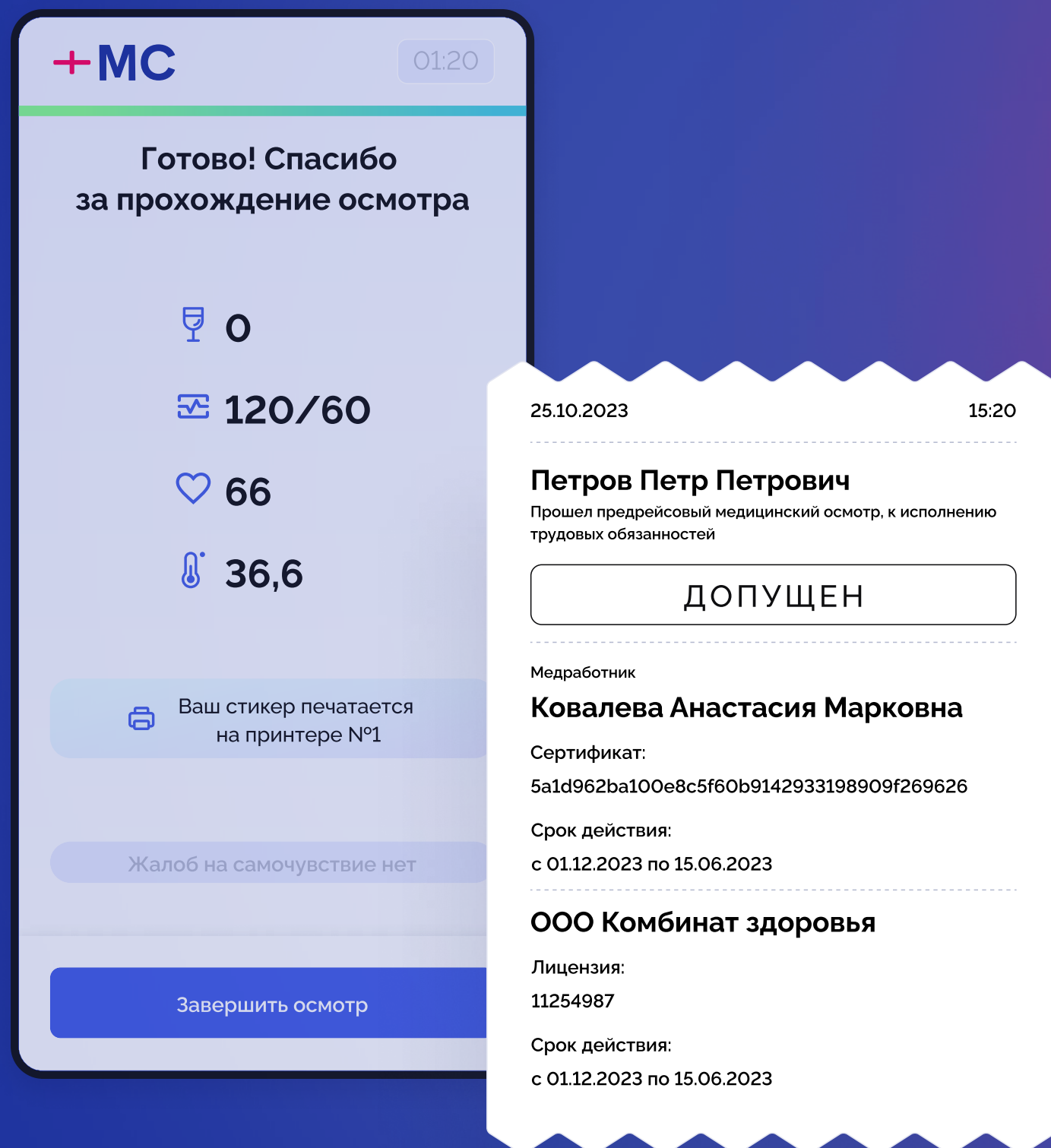

- Результаты всех измерений Вы видите на экране
- Медицинский работник в течение двух минут сформирует заключение о готовности к исполнению трудовых обязанностей
- После того, как будет сформировано медицинское заключение, оно будет напечатано на стикере

# + MedControl

Система автоматизации медицинских осмотров

## Вы подтвердили свою готовность к рейсу/смене

Желаем успешного  
рабочего дня!

